

Foto's van de metalen voorzetskamer Pulmicort® Nebuhaler® en de juiste wijze waarop het mondstuk geplaatst moet worden.



Aan de linkerkant is de dosis inhaler op de metalen voorzetskamer gezet. Rechts ligt het plastic mondstuk.



Het mondkapje is nu op het mondstuk geplaatst.

De juiste wijze waarop het plastic mondstukje op de metalen voorzetskamer geplaatst moet worden:



Het gematteerde, ruwe uiteinde moet op het metalen hulpstuk geplaatst worden.

Het mond/masker uiteinde, waardoor geïnhaleerd moet worden.